

## Instrucciones de uso del FC2 Female Condom®

Para más información llame al 1-800-274-6601 o visite [www.fc2femalecondom.com](http://www.fc2femalecondom.com)







### PARA ABRIR EL PAQUETE

- Encuentre la flecha en la lengüeta de apertura en la esquina derecha superior y tire para abrir (Fig. A).
- Frote la parte externa de la bolsa plástica para asegurarse de que el lubricante está distribuido uniformemente dentro de la bolsa desde la parte inferior a la superior.
- Saque el FC2 y mírelo de cerca para asegurarse de que no esté dañado

### PARA INTRODUCIR EL CONDÓN FEMENINO FC2

- Encuentre una posición cómoda. Intente pararse con un pie sobre una silla, siéntese con las rodillas separadas o ubíquese en cuclillas.
- Asegúrese de que el anillo interno está en el extremo cerrado inferior de la bolsa. Fig. B
- Sujete la bolsa de plástico con el extremo abierto hacia abajo. Al sujetar la parte externa de la bolsa, apriete el anillo interno con sus dedos pulgar y medio.
- Coloque su dedo índice entre el pulgar y el dedo medio y siga apretando el anillo interno (Fig. C (a)).
- O sólo apriete, lo que le sea más fácil (Fig. C (b)).
- Sostenga la envoltura con el extremo abierto colgando.
- Mientras está apretando el Condón Femenino FC2, con la otra mano separe los labios de la vagina como si se estuviera preparando para introducir un tampón.
- Introduzca el Condón Femenino FC2 como se muestra en la Fig. D.
- Tómese su tiempo. Si el Condón Femenino FC2 está resbaloso para introducirlo, suéltelo y comience de nuevo.
- Ahora empuje el anillo interno y la bolsa el tramo que queda dentro de la vagina con su dedo índice. Verifique que el anillo interno esté por encima de su pubis. (Fig. E)
- Encontrará su pubis haciendo una curva con su dedo índice cuando esté unas pulgadas dentro de la vagina.
- Este paso puede ser difícil la primera o la segunda vez porque el Condón Femenino FC2 está lubricado
- Tómese su tiempo y empuje el extremo cerrado del Condón Femenino FC2 hasta donde pueda sentir el pubis.
- Asegúrese de insertar el Condón Femenino FC2 derecho (y no torcido) adentro de la vagina.
- Es importante también que el anillo externo esté fuera de los labios externos de la vagina como se muestra en la Fig. F.

- • Alrededor de una pulgada del extremo abierto quedará fuera de su cuerpo. FIG. F. Si bien esto puede parecer poco usual, es esta parte del Condón Femenino

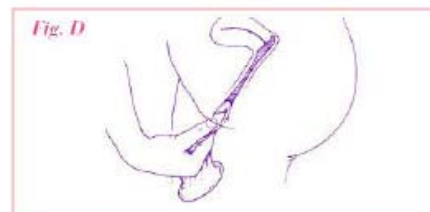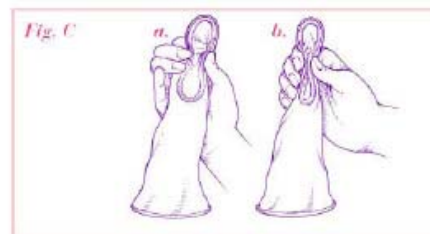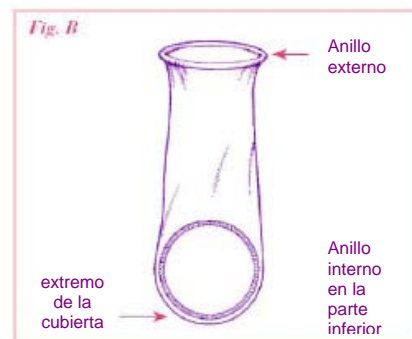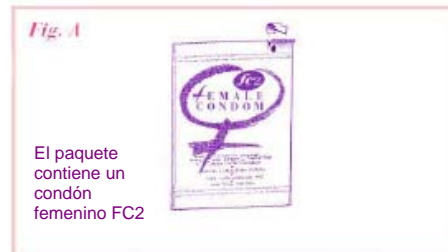

FC2 la que ayuda a protegerla a usted y a su pareja durante el sexo. Una vez que el pene se introduce, la vagina se expande y no quedará ya suelto el condón.



- Hasta que usted y su pareja se familiaricen con el Condón Femenino FC2, use su mano para guiar al pene hacia la vagina. Vea la FIG. G.
- Luego de usarlo dos o tres veces, ya se habrán familiarizado con el Condón Femenino FC2 y apenas notarán la bolsa o el anillo externo durante la relación sexual.

#### Durante la relación sexual

- Notará que el condón femenino FC2 se mueve durante el acto sexual. Ver Fig. H.
- El movimiento de lado a lado del anillo exterior es normal.
- A veces el condón femenino FC2 puede deslizarse hacia arriba y abajo en la vagina, “montándose” en el pene. Tanto la vagina como el pene siguen cubiertos.
- Sin embargo, si nota que el condón femenino FC2 se está deslizando por fuera de la vagina, **DETÉNGASE**, quíteselo e introduzca un nuevo condón.
- Si empieza a sentir que el anillo exterior está siendo empujado hacia la vagina, **DETÉNGASE** (Fig. I). O, si el pene comienza a entrar por debajo o por el costado de la bolsa, **DETÉNGASE** (Fig. J). Retire el condón femenino FC2. Colóquese uno nuevo. Asegúrese de que la parte externa quede sobre la vagina.

#### Luego del acto sexual

- Para sacarse el Condón Femenino FC2, apriete y retuerza el anillo externo para mantener el esperma dentro de la bolsa. Sáquelo suavemente. Arrójele a un cesto de basura. No lo tire por el inodoro. No lo vuelva a usar. Vea la Fig. K.

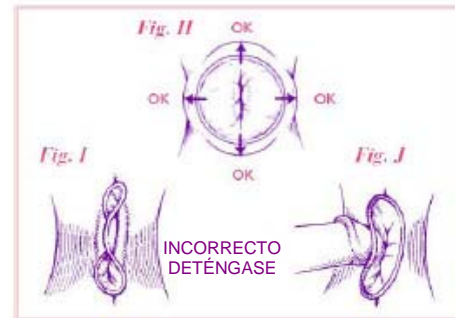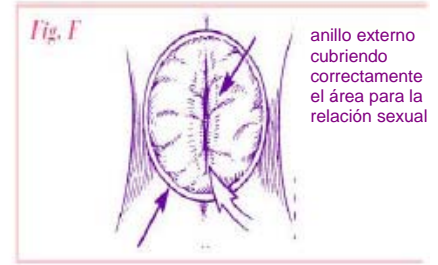

**Recuerde:** Para ayudar a reducir el riesgo de embarazo y el contagio de enfermedades de transmisión sexual:

Utilice el Condón Femenino FC2 correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales. Siga las instrucciones atentamente. Asegúrese de no romper el condón FC2 con sus uñas ni con otros objetos cortantes. Información importante: Los condones de látex de caucho natural para hombres son altamente efectivos en la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, de ser usado correctamente. Si usted no va a utilizar un condón de látex de caucho natural masculino, puede usar el Condón Femenino FC2 para protegerse usted y proteger a su pareja. El Condón Femenino FC2 sólo funciona cuando se lo utiliza. Utilícelo de manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales. Antes de probar el Condón Femenino FC2, asegúrese de leer las instrucciones y aprenda a utilizarlo correctamente.