

Consejos breves del FC2

Descripción

- El FC2 es una delgada cubierta o bolsa de nitrilo flexible y resistente de 17 cm de largo (6,5 pulgadas, la misma longitud que un condón masculino).
- El FC2 lo usa la mujer durante el acto sexual.
- El FC2 posee un anillo de poliuretano flexible en el extremo cerrado de la bolsa (el extremo que se introduce en la vagina) y un anillo de nitrilo blando en el extremo abierto de la bolsa (el extremo que permanece fuera de la vagina).
- Hay un lubricante a base de silicona dentro del condón, se puede utilizar lubricación extra.
- El FC2 sirve para prevenir embarazos y el contagio de EST, incluso el VIH, recubriendo la vagina.

Efectividad

- Los estudios han demostrado que la efectividad clínica del FC2 es equivalente o comparable a la del FC1.
- Más de 16 años de estudios han comprobado la efectividad del FC1 como barrera de protección contra embarazos no deseados y las EST, incluso el VIH.
- El FC2 es un método controlado por la mujer para prevenir tanto embarazos como EST, incluso el VIH.

Beneficios

- El FC2 puede incrementar la sensación de poder de la mujer, ya que es ella quien lo usa. Además ofrece una protección efectiva doble.
- No es necesario que el hombre tenga una erección para usar el FC2, lo que amplía la intimidad de la pareja.
- El FC2 es una alternativa al condón masculino y una muy buena opción para las personas con sensibilidad al látex.