

## ¿Cuál es la diferencia entre el condón masculino y el condón femenino?



El condón femenino FC (FC1/FC2) es la única forma de protección actualmente disponible contra embarazos no deseados y el contagio de infecciones de transmisión sexual (ETS), incluso el VIH/SIDA, iniciado por la mujer. Está aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y se encuentra en la lista de productos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Condón masculino	Condón femenino FC2
Se desliza por el pene del hombre.	Se introduce en la vagina de la mujer.
Lubricante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede incluir espermicida</li> <li>• Puede ser a base de agua únicamente; no puede ser a base de aceite</li> <li>• Se encuentra en la parte externa del condón</li> </ul>	Lubricante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede incluir espermicida</li> <li>• Puede ser a base de agua o aceite</li> <li>• Se encuentra en la parte interna y externa del condón</li> </ul>
Es necesario que el pene esté erecto	No es necesario que el pene esté erecto
El condón se coloca con el pene erecto	Se puede colocar antes de la relación sexual, no depende del pene erecto
Se debe retirar inmediatamente después de la eyaculación	No es necesario retirarlo inmediatamente después de la eyaculación
Cubre la mayor parte del pene y protege los genitales internos de la mujer	Cubre los genitales internos y parte de los externos de la mujer y la base del pene, lo que significa una mayor protección.
Los condones de látex se pueden deteriorar si no se guardan correctamente.	No es susceptible al deterioro por temperatura o humedad.
Se recomienda utilizarlo una sola vez.	Se recomienda utilizarlo una sola vez.